



### Messung Ihres Ferritin-Levels

Eisenmangel ist weltweit eine der häufigsten Mangelerscheinungen. Die Folge des Mangels kann eine Blutarmut (Anämie) sein, die unter anderem mit Müdigkeit, Blässe, trockener Haut, brüchigen Fingernägeln und erhöhter Infektanfälligkeit einhergeht. Sind Sie sich einer Unterversorgung mit Eisen bewusst, können Sie mit einer Ernährungsumstellung oder passenden Nahrungsergänzungsmitteln gegensteuern.

Erfahren Sie mit dem cerascreen® Eisen Test die Konzentration des Ferritins, der Speicherform des Eisens, in Ihrem Blut. Der Test ist ein Probenahme- und Einsende-Testkit für zuhause: Sie entnehmen sich selbst wenige Tropfen Blut, ausgewertet wird Ihre Probe dann in einem medizinischen Fachlabor.

- + zuhause Probe entnehmen – einfach & diskret
- + professionelle Analyse im medizinischen Fachlabor
- + aussagekräftiger Messwert Ferritin (Speicherform des Eisens)
- + Ergebnis innerhalb weniger Tage nach Probeneingang
- + inkl. 15-minütige Telefonberatung für weitere Fragen oder Ernährungsberatung

### Unsere Expertise für Sie

Cerascreen® ist Marktführer für medizinische Probenahme- und Einsende-Testkits in Europa, mit über 10-jähriger Erfahrung in der Entwicklung und Auswertung von Tests. Wir haben mehr als 65 diagnostische Testkits für alle Biomarker-Typen entwickelt, mehr als 500.000 Proben ausgewertet und beliefern über 20 Länder.



**Testen**, welche Probleme es gibt und wie Ihr Körper auf Einflüsse von außen reagiert



**Wissen**, wie Nährstoffe, Umweltfaktoren und Lebensstil mit Gesundheit und Wohlbefinden zusammenhängen.



**Handeln**, durch Lebensstil, Ernährung, Nahrungsergänzungsmittel und gegebenenfalls Therapien. Gesundheit und Leistungsfähigkeit optimieren und Krankheiten vorbeugen.



### Wie funktioniert der Test?

#### 1. Zuhause testen



Ihr Testkit enthält alles, was Sie für die Entnahme einer kleinen Blutprobe aus Ihrer Fingerspitze brauchen. Anschließend schicken Sie die Probe im beiliegenden Rücksendeumschlag kostenfrei an unser medizinisches Fachlabor.

#### 2. Ergebnisse online ansehen



Nach der Auswertung im medizinischen Fachlabor erhalten Sie online Zugriff auf Ihren persönlichen Ergebnisbericht.

#### 3. Handeln



Ihr Zugang zu den Testergebnissen sowie zu den evidenzbasierten Erkenntnissen und Tipps, um Ihre Gesundheit zu verbessern: das mein cerascreen®-Nutzerprofil auf unserer Website oder unserer App.

## Eisen Test

**Der Eisen Test ist für bestimmte Personengruppen nicht oder nur eingeschränkt geeignet:**

- + Menschen mit ansteckenden Krankheiten wie Hepatitis und HIV dürfen den Eisen Test nicht durchführen.
- + Menschen mit der Bluterkrankheit (Hämophilie) sollten den Bluttest nicht machen.
- + Schwangere und stillende Frauen sollten den Eisen Test nur unter ärztlicher Begleitung durchführen. Für sie gelten auch die Referenzwerte und Empfehlungen nicht oder nur eingeschränkt, sie sollten sich Anweisungen zum Testergebnis von Ihrem Arzt oder Therapeuten einholen.
- + Der Eisen Test eignet sich nicht für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren.
- + Der Test ist nicht dazu geeignet, schwere Krankheiten zu untersuchen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.

Weitere Informationen zum Eisen Test:

<https://www.cerascreen.at/products/eisenmangel-test>



PZN 5839345

Dieses Kit kann nur innerhalb Österreichs  
kostenlos zurückgesendet werden.

