




Hausstauballergie Test

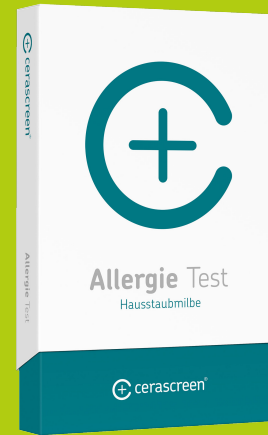

Allergie gegen Hausstaubmilben

Die Hausstauballergie ist häufig und verursacht vor allem morgens nach dem Aufstehen Beschwerden. Typische Symptome sind eine verstopfte Nase, Schnupfen und Niesattacken sowie tränende und juckende Augen.

Mit dem cerascreen® Hausstauballergie Test bestimmen Sie die Anzahl spezifischer IgE-Antikörper für Hausstaubmilben in Ihrem Blut. So erfahren Sie, ob Sie auf Hausstaubmilben sensibilisiert und damit möglicherweise allergisch sind.

- + Sensibilisierung gegen Hausstaubmilben
- + zuhause Blutprobe nehmen – einfach + bequem
- + professionelle Analyse im medizinischen Fachlabor
- + Empfehlungen, um allergische Beschwerden zu reduzieren
- + Ergebnis innerhalb von wenigen Tagen nach Probeneingang
- + inkl. 15-minütige Telefonberatung für weitere Fragen

Unsere Expertise für Sie

Cerascreen® ist Marktführer für medizinische Probenahme- und Einsende-Testkits in Europa, mit über 10-jähriger Erfahrung in der Entwicklung und Auswertung von Tests. Wir haben mehr als 65 diagnostische Testkits für alle Biomarker-Typen entwickelt, mehr als 500.000 Proben ausgewertet und beliefern über 20 Länder.



Testen, welche Probleme es gibt und wie Ihr Körper auf Einflüsse von außen reagiert



Wissen, wie Nährstoffe, Umweltfaktoren und Lebensstil mit Gesundheit und Wohlbefinden zusammenhängen.



Handeln, durch Lebensstil, Ernährung, Nahrungsergänzungsmittel und gegebenenfalls Therapien. Gesundheit und Leistungsfähigkeit optimieren und Krankheiten vorbeugen.

Hausstauballergie Test



Wie funktioniert der Test?

1. Zuhause testen



Ihr Testkit enthält alles, was Sie für die Entnahme einer kleinen Blutprobe aus Ihrer Fingerspitze brauchen. Anschließend schicken Sie die Probe im beiliegenden Rücksendeumschlag kostenfrei an unser medizinisches Fachlabor.

2. Ergebnisse online ansehen



Nach der Auswertung im medizinischen Fachlabor erhalten Sie online Zugriff auf Ihren persönlichen Ergebnisbericht.

3. Handeln



Ihr Zugang zu den Testergebnissen sowie zu den evidenzbasierten Erkenntnissen und Tipps, um Ihre Gesundheit zu verbessern: das mein cerascreen®-Nutzerprofil auf unserer Website oder unserer App.


Hausstauballergie Test

Der Hausstauballergie Test ist für bestimmte Personengruppen nicht oder nur eingeschränkt geeignet:

- + Menschen mit ansteckenden Krankheiten wie Hepatitis und HIV dürfen den Hausstauballergie Test nicht durchführen.
- + Menschen mit der Bluterkrankheit (Hämophilie) sollten den Hausstauballergie Test nicht machen.
- + Schwangere und stillende Frauen sollten den Hausstauballergie Test nur unter ärztlicher Begleitung durchführen. Für sie gelten auch die Referenzwerte und Empfehlungen nicht oder nur eingeschränkt, sie sollten sich Anweisungen zum Testergebnis von Ihrem Arzt oder Therapeuten einholen.
- + Der Hausstauballergie Test eignet sich nicht für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren.
- + Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.

Weitere Informationen zum Hausstauballergie Test:

<https://www.cerascreen.at/products/hausstaub-allergie-test>

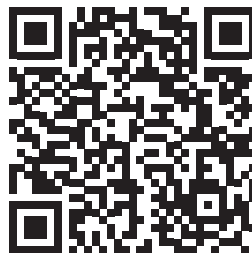

PZN 4879242

Dieses Kit kann nur innerhalb Österreichs
kostenlos zurückgesendet werden.

