

Gebrauchsanweisung

1. Den vorbereiteten Zahn feucht lassen, jedoch nicht nass.
2. Das Innere der Krone und die trockenen Kronenränder leicht mit NoMIX provisorischem Zement bedecken.
3. Die Krone einsetzen, auf guten Sitz prüfen und darauf beißen.
4. 5 Minuten warten. Der Zement ist nun fest genug, um die Reste zu entfernen. Gründlich mit Wasser spülen. Falls nötig, die interproximalen Zwischenräume reinigen, indem Sie Zahnseide verknoten und durchziehen (nicht hochziehen).
5. Der Zement ist nach weiteren 15 Minuten vollständig ausgehärtet. Mindestens eine Stunde lang nichts essen.

Indikationen

NoMIX Provisorischer Zement kann mit Kronen aus temporären oder definitiven Materialien (Acrylat, Komposit, VMK und Keramik) verwendet werden.

Lagerung und Verwendung

Bei Zimmertemperatur lagern
(5 °C - 25 °C)

Den Spender geschlossen halten, wenn er nicht verwendet wird, damit der Zement nicht vorzeitig aushärtet.

Ingredients

Calcium Sulfate, Zinc Oxide, Potassium Sulfate, D.M.T.G. (Glycol), Ethyl Methacrylate Polymer, Triacetin.